

MYTREX

Medi Loop

—— 管理医療機器 ——

医療機器認証番号：304AGBZX00001000

販売名：メディループ 型番：MT-ML21BS／MT-ML21BM／MT-ML21BL

取扱説明

- 汗、皮脂、汚れ等が付着した場合、水またはぬるま湯で洗い流してください。
汚れがひどい際は中性洗剤を適量に薄めてご使用の上、軽く押し洗いしてください。
経年劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくためにもこまめなお手入れをおすすめいたします。
- 洗い終わりは水気を拭き取り、自然乾燥させ完全に乾いてからご使用ください。
タンブラー乾燥はお避け下さい。
- ぬれた衣類などと、長時間一緒に放置しないでください。色移りする可能性があります。
- 入浴の際、入浴剤の種類により、まれに色や香りが付くことがあります。
入浴後は水またはぬるま湯で洗い流してお手入れをしてください。
- 海水浴時、サウナ風呂・温泉利用時には装着しないでください。
変色・劣化の原因となります。
- 小さいお子さまやペットの手の届かないところに保管してください。
- 電子機器(パソコン等)に密着させると誤動作を起こす恐れがありますのでご注意ください。
- 火気に近づけたり、直射日光や高温多湿での装着・保管はお避け下さい。
- 激しい運動やトレーニング機器などを使用する際は、取り外すか十分にご注意ください。
- 推奨保管温度は0℃～35℃です。
- 0℃以下の場所では保管しないでください。本体が硬化し折れてしまう恐れがあります。
万一硬化した場合は、無理に広げずに体温で温めるか、室温10℃以上のところに数分間放置し、柔らかくしてから装着するようにしてください。



【留め具のはずし方・つなぎ方】

はずすときは、留め具の金属パーツを持ち、引っ張ります。

つなぐときは、留め具の突起部分を差し込み「カチッ」と音がするまで押して留めます。

※留め具は片方のみはずれます。

※樹脂部分を引っ張ったり、間違った取り扱いをすると破損する恐れがあります。

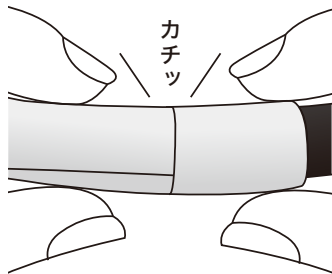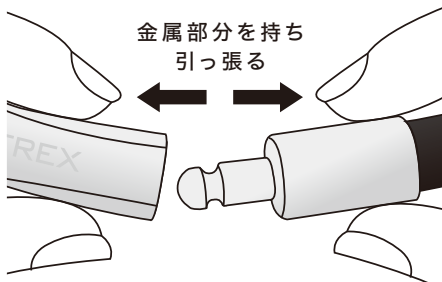

※改造・分解等を行わないでください。※当製品は添付文書をご覧のうえ正しくご使用ください。

製品の仕様、デザインなど予告なく変更になる場合がございます。

MYTREX

<https://mytrex.jp>

[MYTREXカスタマーサポート]

092-260-7366

営業時間：9:00～17:30

(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

発売元 株式会社創通メディカル

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10-5F

製造販売元 サンエス工業株式会社

〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-1-25