


MYTREX
W
FIT PRO

MT-WFP20B

取扱説明書

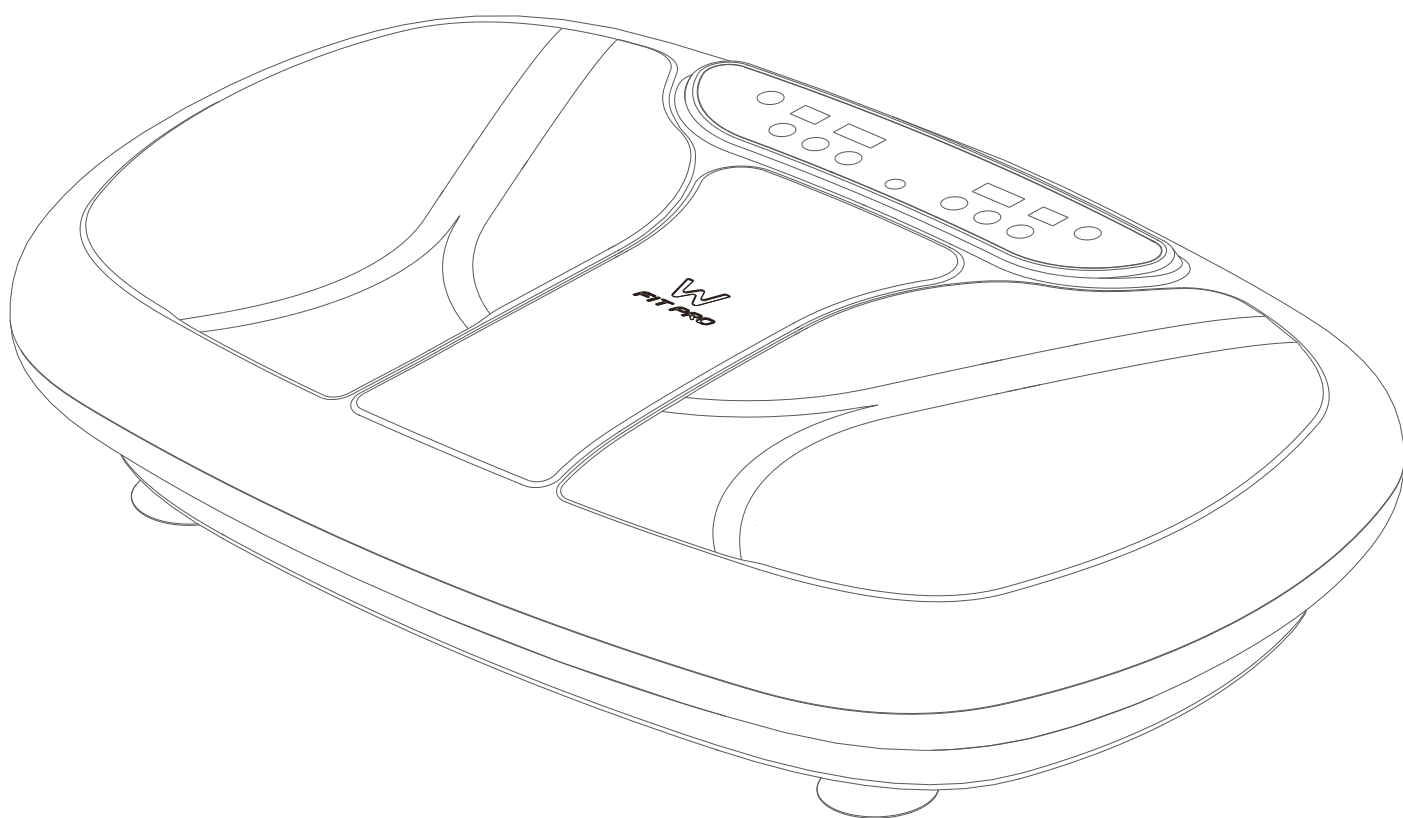

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。
この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

警告表示について： 誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

誤った使い方をすると、「死亡や重傷を負う恐れがある」内容を示しています。



禁止

してはいけない「禁止」内容を示しています。



注意

誤った使い方をすると、「損傷を負う可能性や物的損害が発生する恐れがある」内容を示しています。



必ず守る

必ず実行して頂く「強制」内容を示しています。

警告



禁止

- 医師から運動を制限されている方、医師が使用を不相当と認める方は使用しない。
症状を悪化させる原因になります。
- 次のような方は使用しない。本製品を使用中の方にも近づかない。
事故やケガ、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器を使用している方
 - ・人工心肺など生命維持用医用電子機器を使用している方
 - ・心電計などの装着型医用電子機器を使用している方
 - ・自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
 - ・妊娠中の方や妊娠の疑いのある方
- 体調が優れないときや、眠気がある時、飲酒時や、食後すぐは使用しない。また、飲食・喫煙をしながら使用しない。
事故やケガの原因になります。
- 本製品を同時に2人以上で使用しない。体重120Kgを超える方は使用しない。
事故やケガの原因になります。
- アクセサリーやベルトをつけたまま使用しない。物品をポケットに入れたり、身に着けたまま使用しない。
事故やケガの原因になります。
- 使用中は他の作業を行わない。
ケガや思わぬ事故の原因になります。
- 定められた使用方法以外では使用しない。特に、頭部や心臓部に直接振動を与えるような使用はしない。
体調不良の原因になります。
- 本体の動作中は、操作パネル・ステップ面(振動面)以外の本体に触れない。動作停止時でも、本体の隙間に手や物を入れない。
事故やケガの原因になります。
- 本体の上で飛んだり跳ねたり、身体に過度に負担をかける使用方法はしない。また、使用中に本体がガタつくほど前後左右に振動を与えたり、周囲の人が使用者や本体を押しったり引いたりしない。
事故やケガ、故障の原因になります。
- 電源コードをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らない。また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電やショートによる火災などの原因になります。
- 浴室や湿気の多い場所で使用、充電、保管をしない。また、水のかかりやすい所に置かない。
感電や火災の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所(火のそば、炎天下の車内など)で、使用、充電、保管をしない。
発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。

警告



禁止

- 乳幼児及び子供の手の届く場所には保管せず、使用させない。ペットには使用しない。
事故やケガの原因になります。
- 電源コードが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電や火災の原因になります。
- 電源コードを本体などに巻き付けたり、破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また、重いものを乗せ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
感電やショートによる火災などの原因になります。
- 付属の電源コード以外は使用しない。また、付属の電源コードを他の製品に使用しない。
火災・感電・故障の原因となります。
- 不安定な場所で保管しない。また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしない。
けがや本体が故障する原因となります。
- 交流100V以外で使用しない。電源コードは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
火災・感電・故障の原因となります。
- 本体や付属品の隙間や差込口部分に液体、金属類、異物、ほこりなどを付着させない。
感電やショートによる火災などの原因になります。



必ず守る

- 次に該当する方は必ず医師と相談のうえ使用する。
下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。
 - ・医療機関で治療中の方
 - ・発熱(38℃以上)している方、倦怠感・悪寒・血圧変動などが感じられる方、衰弱している方
 - ・神経障害、皮膚知覚障害のある方
 - ・糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
 - ・めまいやふらつきなど平衡感覚に異常のある方
 - ・緑内障や網膜剥離、結膜炎など目に障害のある方、中耳炎など耳に障害のある方
 - ・生理中の方、出産直後の方
 - ・皮膚疾患のある方(各種皮膚炎、皮膚感染症、皮膚の炎症、内出血しやすい方)
 - ・心臓疾患、血行障害、毛細血管拡張、高血圧など血圧や血管に異常のある方(脳卒中、脳梗塞、心臓疾患、血栓症、抗凝固薬を服用中の方、血塞症、動脈瘤、静脈瘤などの方)
 - ・怪我をしている方、内出血している方、内出血の可能性がある方
 - ・骨折や骨粗しょう症、ヘルニアなど、骨に異常のある方、背骨が曲がっている方
 - ・呼吸器障害のある方・脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)
 - ・機能的障害のある方・悪性腫瘍のある方
 - ・内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある方
 - ・捻挫、肉離れなどしている方、しやすい方、骨髄炎、腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、リウマチ症、変形関節炎、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、痛風、急性(疼痛性)疾患のある方
 - ・病気で療養中の方、または過去に疾病などがあつた方、薬を服用中の方、手術を受けた方
 - ・体にしびれのある方
 - ・リハビリテーション目的で使用される方
 - ・身体にボルト等の金属を埋め込んでいる方
 - ・安静を必要とする方、四肢の不自由な方
 - ・体調不良、身体に異常を感じている方
- 次のような症状が現れたときは、直ちに使用を中止する。症状が続く場合は、医師に相談してください。
事故や体調不良を起こす原因になります。
例)めまい、ふらつき、冷や汗、心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、嘔吐、けいれん、身体の痛み、その他心身の異常

警告



必ず守る

- 初めて使う場合や、ご高齢の方などは、短時間で速度の遅い状態から使用し、徐々に身体を慣らすようにする。急激に運動量を増やすとケガや体調不良の原因になります。
- 本体への巻き込み防止のため、運動中は、大きめの衣服は避け、身体にフィットする衣服を着用する。また、手指や髪の毛の巻き込みにも注意する。
- 使用前には必ず、製品に損傷がないかを確認し、異常が発見された場合には使用を止め、カスタマーサポートに連絡する。
- 使用中は、リモコンや操作パネルを使用者以外に触らせない。ケガや思わぬ事故の原因になります。
- 本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。破損・発火の原因になります。



電源プラグ
を抜く

- 使用しないときや、雷が鳴りだしたときには、電源プラグをコンセントから抜く。
- 万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、コンセントから電源プラグをすぐに抜く。けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



分解禁止

- 分解、修理、改造はしない。火災・感電・けが・故障の原因になります。



ぬれ手禁止

- 本体および付属品に水をかけたり、水洗いしない。また、ぬれた手で触れない。感電やショートによる火災などの原因になります。

注意



禁止

- エクササイズ以外の用途には使用しない。ケガや本体が故障する原因になります。
- 1回10分、1日最大60分を超えて使用しない。また、慣れないうちは、弱い振動・EMSレベル、および短時間から開始し、慣れてきたら徐々にレベルを上げるようにする。長時間使用すると、逆効果やケガの原因になります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を加えない。火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の端に乗ったり、不安定な姿勢で使用しない。事故やケガの原因になります。
- 付属のバンド以外は使用しない。使用前にバンドに傷がないこと、ベルトが確実に固定されていることを確認する。事故やケガの原因になります。

⚠ 注意



必ず守る

- **本製品は必ず屋内で使用する。床強度がしっかりとした水平な床の上に設置するようにし、屋外やベランダなどのチリやほこり、砂などが多い場所、滑りやすい場所、湿度の高い場所、熱器具の近く、畳や傷つきやすい床への設置は避ける。**
ケガや本体が故障する原因になります。
- **本製品や身体が、家具や周囲の人にぶつからないよう、家具などから離し十分なスペースを確保する。**
事故やケガの原因になります。
- **テレビなどの映像・音響機器のそばで使用すると、ノイズ(乱れ)が入る場合があるため、機器から離して設置する。また、磁器を利用したカード類(キャッシュカードなど)を本製品に近づけない。**
- **本体の上に立った姿勢で使用する場合、ひざを軽く曲げる。(ひざを曲げずに直立姿勢で使用すると、ひざへの負担が大きくなったり、頭部への振動が強く伝わる場合があります。)また、使用中に姿勢を変える場合は、十分に注意する。**
事故やケガの原因になります。
- **素足や運動靴で使用する。**
水滴がついたままの足や、靴下やスリッパなどを履いて使用すると滑りやすく、転倒の原因になります。
- **本製品のEMS機能を使用するときは、身体から金属類、アクセサリー類を外す。**
強いショックを受ける恐れがあります。
- **初めてEMS機能を使用するときには、刺激に慣れるまではイスに座るなど安定した姿勢で行う。**
事故やケガの原因になります。
- **1人での運動に不安のある方は、介助者をつけて使用する。または、近くに壁などの支えのあるそばで使用する。**
事故やケガの原因になります。なお、自立歩行が難しい方や、杖などをお使いの方は、ステップの上に乗ってのご使用をお控えください。イスなどに座って、安定した姿勢で安全にお使いください。
- **本製品に乗り降りする際は、運転が完全に停止していることを確認する。**
事故やケガの原因になります。
- **定期的に本体および付属品の汚れなどを拭きとり、お手入れをする。**
電源プラグにホコリが付着すると、火災の原因になります。なお、長期間ご使用になられますと、サビや消耗により部品などの劣化が起こる場合があります。
- **使用しないときは、電源スイッチをオフにする。また、長期間(1週間以上)使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。**
火災や漏電の原因になります。
- **リモコンは、電池の液漏れによる故障防止のため、長期間(1週間以上)使用しない場合は、電池を抜いてから保管する。**
- **コイン型電池は、取扱説明書の説明にしたがって取り扱う。電池が液漏れし、皮膚や衣服に液が付着した場合は、直ちに水で良く洗い流し、医師に相談する。**
コイン型電池の破損や、漏電、液漏れなどによる火災やケガ、故障の原因になります。



電源プラグを
を抜く

- **お手入れ・移動・保管の際には、必ず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。**
- **停電時には、直ちに電源プラグをコンセントから抜く。**

セット内容と各部の名称


セット内容 万一、セット内容に不足がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡下さい。

●本体(マイトレックス ダブルフィットプロ).....	1台
●電源コード.....	1本
●リモコン.....	1台
●バンド.....	2本
●取扱説明書.....	1部

- ・本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- ・本製品は医療機器ではありません。


各部の名称

本体

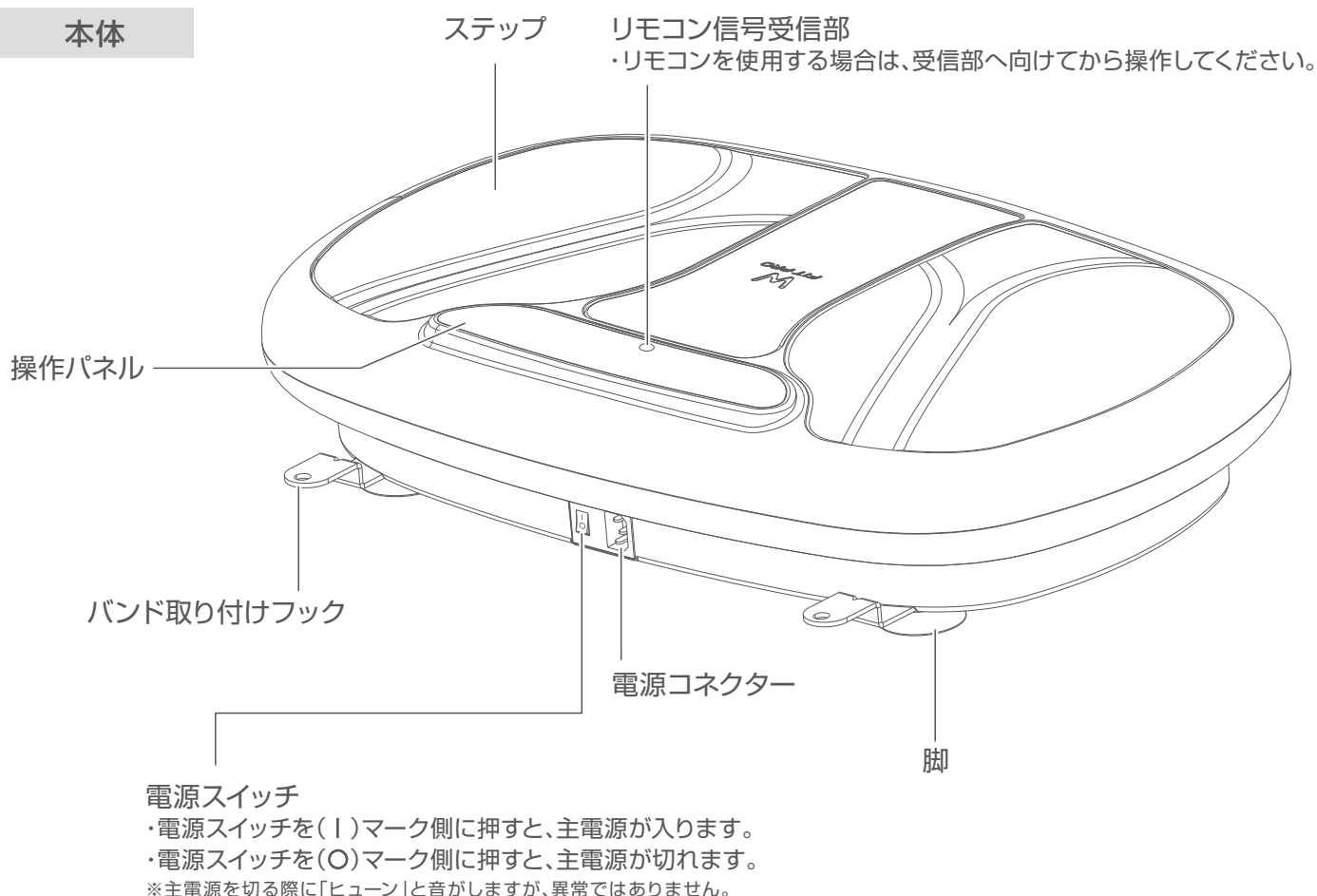


操作ボタンの名称と各機能

操作パネル

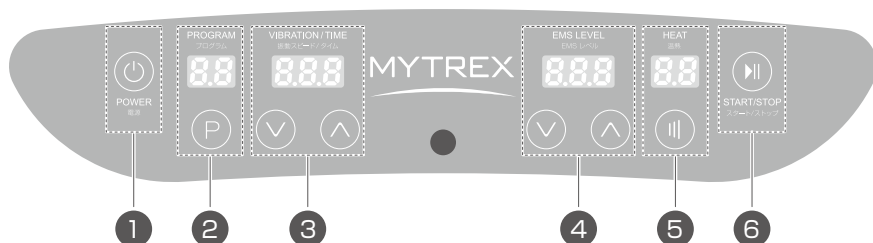

リモコン

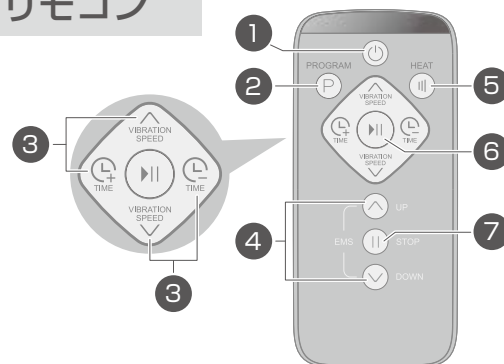

No.	名称	本体	リモコン	説明
①	電源ボタン			電源の入/切をおこないます。電源を入れると、操作パネルのライトが点灯し、スタンバイモードになります。使用後は、電源ボタンを押して電源を切ってください。
②	プログラム表示		—	選択中のエクササイズプログラムを表示します。
	プログラムボタン			エクササイズプログラムを選択します。 ⇒ボタンを押すたびに、マニュアルモード「88」、およびオートモード「P1、P2、P3」が切り替わります。デフォルトはマニュアルモード「88」です。
③	振動スピード/ タイム表示		—	エクササイズスピードおよびタイム(残り時間)を表示します。動作中は、振動スピードおよびタイムが交互に表示されます。
	振動スピード/ タイム設定ボタン			<p>振動スピード</p> <p>↑ VIBRATION SPEED 数値を上げる</p> <p>↓ VIBRATION SPEED 数値を下げる</p> <p>タイム</p> <p>⌚+ TIME 数値を上げる</p> <p>⌚- TIME 数値を下げる</p> <p>スタンバイモード時に押す ⇒タイムの設定をします。タイムは、1分～10分から選択できます。デフォルトは10分です。 ※タイム設定後、一旦スタートボタンを押して動作を開始すると、タイムの再設定はできません。タイムを再度設定する場合は、電源ボタンを押して電源を切り、初めから設定しなおしてください。</p> <p>動作中に押す ⇒振動スピードの調整をします。振動スピードは、レベル1～99から選択できます。デフォルトはレベル1です。</p>
④	EMSレベル表示		—	設定されたEMSレベルを表示します。
	EMSレベル 設定ボタン			EMSレベルを設定します。EMSレベルは、いつでも設定・変更することができます。 ⇒レベル0～20から選択できます。デフォルトはレベル0(刺激なし)です。EMS機能を開始するには、(⌚+) ボタンを押します。EMS機能を停止するには、(⌚-) ボタンを押してレベル0を選択するか、リモコンの(⏸) ボタンを押します。
⑤	ヒートレベル表示		—	設定されたヒートレベルを表示します。
	ヒートレベル 設定ボタン			ヒート(温熱)レベルを設定します。ヒートレベルは、いつでも設定・変更することができます。 ⇒レベル0～10から選択できます。デフォルトはレベル0(温めなし)です。ボタンを押してレベル1以上を選択すると、ヒート機能が開始されます。ヒート機能を停止するには、レベル0を選択します。 ※ヒート機能は、冬場など足が冷えやすいときにオンにすると快適にご使用いただけます。
⑥	スタート/ ストップボタン			選択したエクササイズプログラムを開始します。また、エクササイズプログラム動作中に押すと、使用中の機能をすべて停止します。
⑦	EMS ストップボタン	—		EMS機能のみを停止します。

ご使用前の準備

リモコンについて


注意

※初めてご使用になる際には、絶縁シートをリモコンから引き抜いてください。
※出荷時にリモコンに挿入済みのコイン型電池はテスト用のため、新しい電池に比べ容量が少なくなっています。リモコン操作時に本体の反応が弱くなったときは、リモコン裏面の記載にしたがって電池ホルダーを開け、新しい電池("CR2025"コイン型リチウム電池)に交換してください。電池はプラス極(+)を表にしてください。

●CR2025電池以外を使用しない。●45℃以上の環境で電池を使用しない。●長期間使用しない場合は、電池を取り外す。●使用済電池は、各自治体の分別ルールに従って廃棄する。●コイン型電池を充電したり、加熱したり、分解したりしない。●火中に投下しない。●コイン型電池の使用期限を超えたものや、液漏れしているものは使用しない。●水をかけたり濡れた手で触れない。●乳幼児、小さなお子様の手の届く場所やペットが触れる場所に保管しない。

バンドの取り付け方法


- ※必要に応じて、本体下部のバンド取り付けフックにバンドを取り付けてご使用ください。
- ※バンドを使うと、振動を上半身に伝えるため、運動の負荷を高めることができます。
- ※バンドは、引っかかり防止のため、使用するときだけ本体に取り付けるようにしてください。

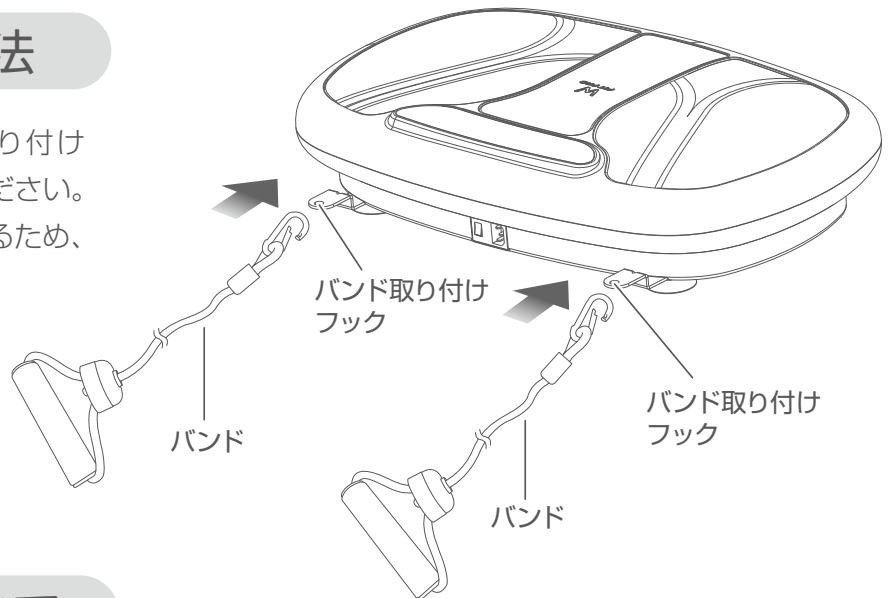

アース線の接地について

アース線は万が一、本体が水にぬれるなどして漏電した場合に、感電を防止するための安全装置です。水回りなど水気のある場所で使用される場合は、必ずアース線を接地してください。

電源コンセントにアース端子がない場合は、お近くの電気工事店に相談しD種接地工事をしてください。(本体の価格には、工事費は含まれておりません) ガス管、水道管、電話や避雷針のアースには絶対に取り付けしないでください。

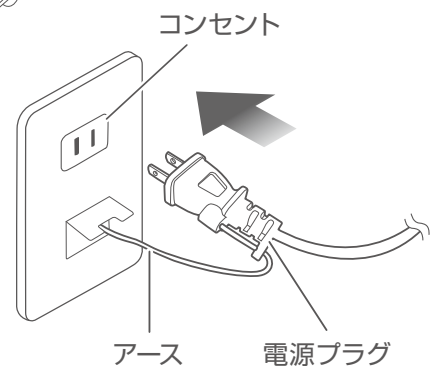

注意

- 設置場所にアース線を接続するところがない場合は、以下の点に特に注意してご使用下さい。
- ・水気のない場所で使用する。
 - ・ご使用後は毎回電源スイッチをオフにし、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
 - ・雷が鳴り出した場合、直ぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。

ご使用方法

電源を入れる

1

本体を設置する。

※周囲に障害物のない、床強度がしっかりとした水平な床の上に設置してください。滑りやすい場所や、不安定な場所でのご使用は避けてください。本体を置く時や移動する場合は、しっかりと両手で持っておこなってください。
※畳の上では使用しないでください。柔らかいフローリングなど、設置場所によっては設置跡や傷がつく恐れがあります。必要に応じて、ゴムマットなど滑りにくい敷物をご使用ください。

2

電源コードを本体側電源コネクタに差し込む。

※まっすぐ止まるまで差し込んでください。


3

電源プラグをコンセントに差し込む。

※まっすぐ奥まで差し込んでください。

4

本体の電源スイッチをオン(↑)にする。

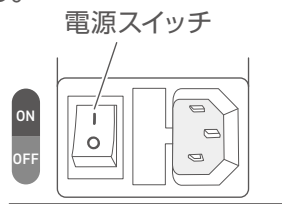


5

本体の操作パネル、またはリモコンの電源ボタン(⏻)を押して電源を入れる。

●操作パネルのライトが点灯し、スタンバイモードになります。

※しばらく操作をしない状態が続くと、約1分後に電源がオフになります。

再度操作をする場合は、操作パネルまたはリモコンの電源ボタンを押してください。

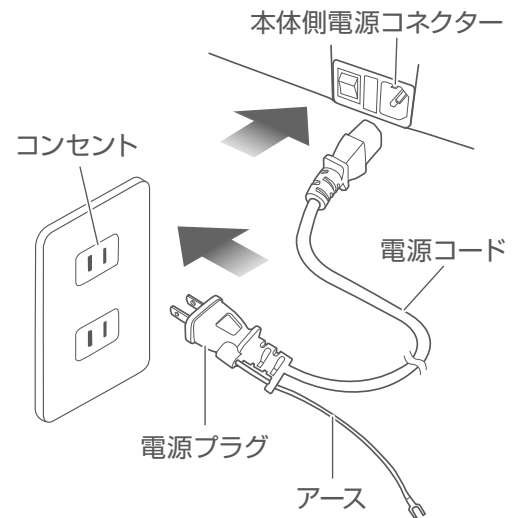

操作のしかた

エクササイズプログラムには、マニュアルモード「88」とオートモード「P1、P2、P3」があります。

本体の操作パネル、またはリモコンを使って設定することができます。操作パネルおよびリモコンボタンの設定内容の詳細については、『操作ボタンの名称と各機能』(6ページ)をご参照ください。

■機能一覧表

エクササイズプログラム	振動スピード	タイム	EMS	ヒート
88(マニュアルモード)	レベル1~99	1~10分	レベル0~20	レベル0~10
P1~P3(オートモード)	設定不可	設定不可	レベル0~20	レベル0~10

※エクササイズプログラム・EMS機能・ヒート機能は、それぞれ単独で使用することも、同時に使用することも可能です。

エクササイズプログラム: マニュアルモードで使う

POINT

マニュアルモードでは、お好みに合わせて振動スピードおよびタイム設定が可能です。高齢の方や初めてお使いの方は、マニュアルモードでのご使用をおすすめします。慣れるまでは、最も低い振動スピード・EMSレベルからご使用ください。

ご使用方法

- 1 | プログラムボタンでマニュアルモード「88」を選択する。
- 2 | タイム(残り時間)を設定する場合は、振動スピード/タイム設定ボタンで設定する。
- 3 | ステップの上に乗る。
※姿勢の取り方については、『ポージングについて』(11ページ)をご参照ください。
※素足(EMS機能使用時)または運動靴を着用してください。水滴がついたままの足や靴下などでの使用を避け、滑らないようにご注意ください。
- 4 | スタート/ストップボタンを押して、動作を開始する。
※振動スピードを調整するには、振動スピード/タイム設定ボタンを押します。
- 5 | EMS機能を使う場合は、EMSレベル設定ボタンを押して開始する。また、ヒート機能を使う場合は、ヒートレベル設定ボタンを押して開始する。
※EMS機能およびヒート機能は、エクササイズプログラム開始前でも、動作中でも設定を変更することができます。
- 6 | 途中で停止するには、スタート/ストップボタンを押す。
※タイムを設定していない場合でも、開始後10分で自動的に停止します。
※動作が完全に停止してから降りてください。
- 7 | 使用後、電源ボタンを押して電源を切る。


エクササイズプログラム:オートモードで使う

POINT

オートモードでは、10分間の全自動プログラムが準備されています。目的に応じて、3つのモードから選択してください。なお、振動スピードとタイムの設定は個別にはできませんのでご注意ください。慣れないうちは、ウォーキングモード「P1」をおすすめします。使用される方や体調に合わせて、無理のない範囲でご使用をお願いいたします。


P1 ウォーキングモード (振動スピード:レベル16~58)

初心者におすすめの低速度~中速度が中心の緩やかに速度が変化するモード。

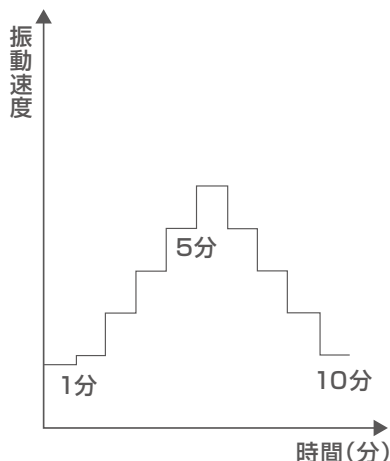


P2 バランスモード (振動スピード:レベル20~99)

さまざまな速度の振動をランダムに組み合わせることで筋肉を効率的に刺激するモード。

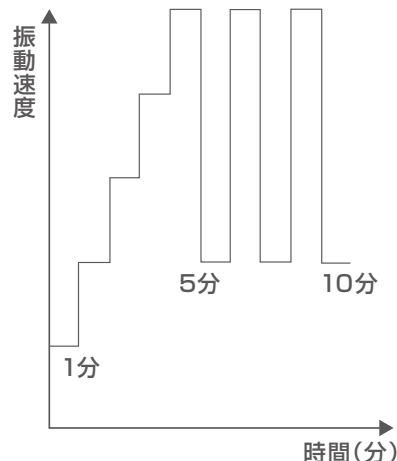

P3 フィットネスモード (振動スピード:レベル20~80)

振動レベルに強弱をつけて繰り返すことで、リズムよく総合的に筋肉にアプローチするモード。

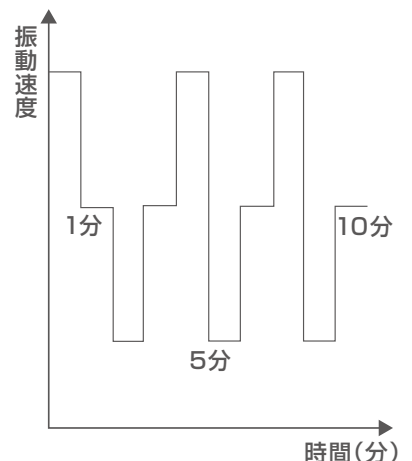


- 1 | プログラムボタンでオートモード「P1」、「P2」、または「P3」を選択する。
- 2 | ステップの上に乗る。
 ※姿勢の取り方については、『ポージングについて』(11ページ)をご参照ください。
 ※素足(EMS機能使用時)または運動靴を着用してください。水滴がついたままの足や靴下などでの使用を避け、滑らないようにご注意ください。
- 3 | スタート/ストップボタンを押して、動作を開始する。
- 4 | EMS機能を使う場合は、EMSレベル設定ボタンを押して開始する。また、ヒート機能を使う場合は、ヒートレベル設定ボタンを押して開始する。
 ※EMS機能およびヒート機能は、エクササイズプログラム開始前でも、動作中でも設定を変更することができます。
- 5 | 途中で停止するには、スタート/ストップボタンを押す。
 ※開始後10分で自動的に停止します。
 ※動作が完全に停止してから降りてください。
- 6 | 使用后、電源ボタンを押して電源を切る。

EMS機能について

初めてEMS機能を使用するときには、刺激に慣れるまではイスに座るなど安定した姿勢で行ってください。


正しく通電させるため、素足・素肌でご使用ください。肌の水分が足りない場合、通電がしにくくなる可能性がありますので、足の裏などをぬれタオル等で拭き、湿らせてからご使用ください。

安全のため、身体から金属類、アクセサリ類を外してからご使用ください。

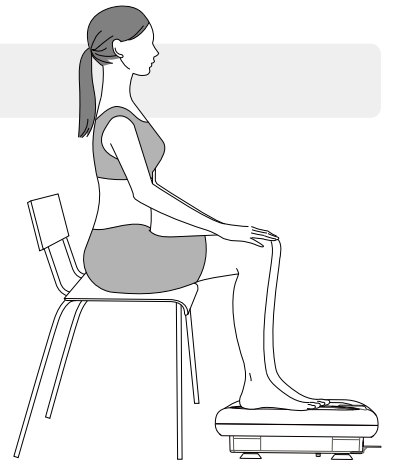

POINT

正しく通電させるために、ステップのそれぞれ右側と左側に足や腕を乗せてください。

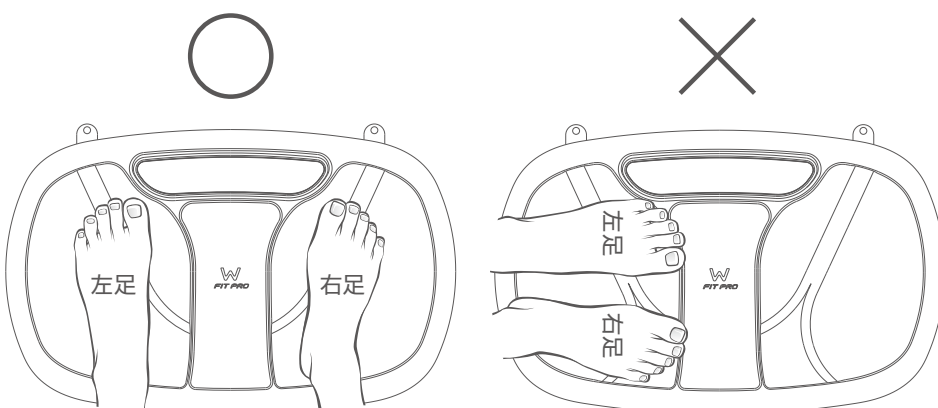

注意

EMSを効率良く通電させるために、ステップにカーボン(炭)を配合しています。そのため、ご使用後に足の裏などの接触部位が黒っぽくなる場合があります。汚れが気になる場合は、濡れタオルなどで接触部位を拭き取ってください。


ポージングについて

ポージングを変えることで、各部位を集中的にエクササイズします。バンドを使用すると、上半身もトレーニングすることができます。EMS機能を使用する場合は、ステップのそれぞれ右側と左側に足や腕を乗せる必要があります。転倒に十分注意し、無理のない範囲でおこなってください。

基本姿勢

少しひざを曲げ、背筋を伸ばし、手を広げてバランスをとります。


部位 | 腹筋、太もも、ヒップ

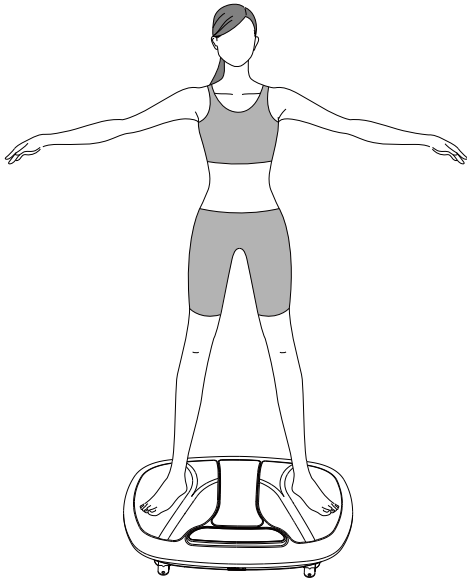

片足のせ

片足を前に出し、ステップに乗せます。


部位 | 太もも

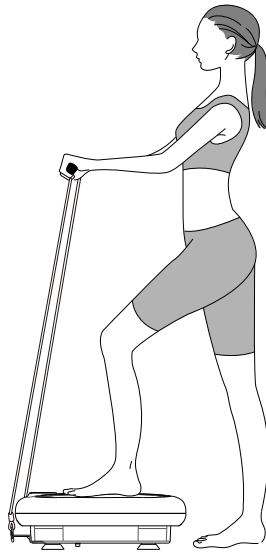

中腰

中腰姿勢で、しっかりと両足に力を入れます。


部位 | 腹筋、太もも内側、ふくらはぎ

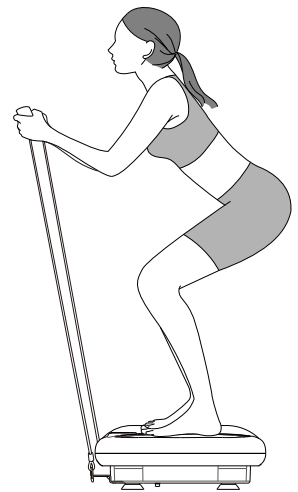

両足のせ

背筋を伸ばして椅子などに座り、両足を乗せます。


部位 | 脚

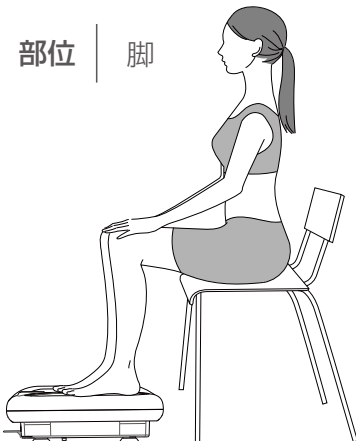

お尻集中

背筋を伸ばし、本体に座ります。振動スピードは、低いレベルでおこなってください。


部位 | ヒップ、腰

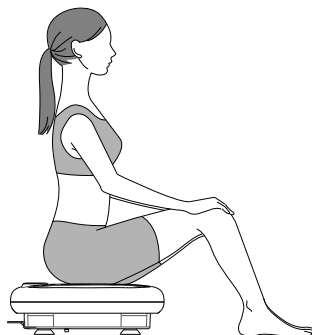

腕集中

ひざを床につき、腰を上げて、両手をつきます。

部位 | 二の腕、肩まわり

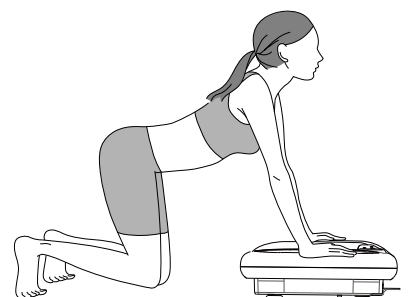

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 必ず、電源コードを本体とコンセントから抜いて行ってください。
- 本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。
- 乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。
- 汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってから本体表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。その後、乾いた布で乾拭きをしてください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管方法

- 使用後は、本体の電源スイッチを切ってください。
- 長期間(1週間以上)使用しないときは、電源コードを本体とコンセントから抜いて保管してください。
- 長期間(1週間以上)使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。汚れやホコリが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。

廃棄について

- 廃棄する際は、各自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

ブランド	MYTREX (マイトレックス)
品名	W FIT PRO (ダブルフィットプロ)
定格入力	AC100V、50/60Hz
定格消費電力	130W
リモコン電池	CR2025 コイン型リチウム電池
使用環境	温度 5℃～40℃、相対湿度 ≤85RH%
EMS周波数	10Hz～70Hz
本体サイズ	約650mm×418mm×132mm
質量	約13Kg
最大使用荷重	120Kgまで
タイマー	マニュアルモード: 1～10分、オートモード: 約10分
製造国	中国

※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがございます。

故障かな?と思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは弊社カスタマーサポートに修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理や改造はしないでください。

症状	確認して頂くこと
電源を入れても動かない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードが本体とコンセントの奥まで差し込まれているか確認してください。 ●電源スイッチが入っているか確認してください。 ●本体操作パネル、リモコンともに動作しないか確認してください。リモコンのみ動作しない場合は、新しいコイン型電池に替え、+極を表側にして挿入してください。 ●リモコンは、本体から1.5メートル以内の範囲で操作してください。
異音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●水平な場所に設置してください。 ●本体の周辺に接触しているものがないか確認してください。 ●本製品は、構造上、ある程度の動作音がするため異常ではありません。
突然停止した	<ul style="list-style-type: none"> ●タイマーにより開始から10分で停止します。
正常に操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●一度、電源スイッチを押して主電源を切ってから、再度お試しください。

MYTREX

発売元：株式会社創通メディカル

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10-5F

<https://mytrex.jp>

©2021 SOTSU MEDICAL CO., LTD.

202402KB

MYTREX カスタマーサポート

製品についてご不明な点やお気づきの点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

営業時間9:00～17:30（土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く）

[電話でのお問い合わせ]

092-260-7366

[WEBでのお問い合わせ]

<https://mytrex.jp/support/>

